

POPIS VÝROBKU: Sterilná hemostatická vstrebateľná želatinová hubka SCROFALON je hemostatický vstrebateľný zdravotnícky prostriedok vyrobený z vysoko čisteného neutrálneho želatínového materiálu prasačieho pôvodu. Jedná sa o biely, svetlo biely alebo takmer biely, vo vode nerozpustný, vysoko porézny, poddajný prípravok určený k aplikácii na krvácajúce plochy ako prostriedok pre zástavu krvácania. K hemostáze dochádza behom 3 až 6 minút. SCROFALON sa dodáva ako sterilný výrobok a je určený výhradne k jednorázovému použitiu. **INDIKÁCIE:**

Prostriedok je indikovaný ku kontrole krvácania behom chirurgických zákrokov. **KONTRAINDIKÁCIE:** Nepoužívajte sterilnú hemostatickú hubku pre pacientov so známou alergiou na želatínu. **NÁVOD K POUŽITIU:** Hubku narežte na požadovanú veľkosť. Použite minimálny množstvo potrebné k dosiahnutiu hemostázy. Hubku držte na mieste krvácania pod miernym tlakom po dobu 10 až 15 sekúnd, pokiaľ nedôjde k hemostáze. Želatínová hubka môže byť ponechaná v mieste krvácania iba vtedy, ak je to nutné. **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:** Skladujte mimo dosah detí. SCROFALON® se používa ako pomocný prostriedok a nie je určený ako náhrada chirurgickej techniky alebo iných konvenčných postupov pre hemostázu. Pri otváraní obalov a vyťahovaní hubky SCROFALON® používajte aseptické techniky, aby nedošlo ku kontaminácii! Pokiaľ je obal poškodený, prostriedok SCROFALON® se nesmie použiť. Ihneď po dosiahnutí hemostázy je potrebné prebytočný SCROFALON® opatrne odstrániť. **NEŽIADÚCE ÚČINKY:** Neboli hlásené žiadne nežiadúce účinky. **SKLADOVANIE:** SCROFALON® je zabalený do sterilného obalu a je sterilizovaný gama žiarením. SCROFALON® sa skladuje v suchu pri teplote 15°C až 30°C. Doba použiteľnosti je 5 rokov od dátumu výroby. Chráňte pred mrazom. Nepoužívajte výrobok po uplynutí doby použiteľnosti.



Vyrobeno spoločnosť:
Eucare Pharmaceuticals (P) Ltd.,
Plot No. AC-25B, SIDCO Industrial Estate.
Thirumudivakkam, Chennai - 600 132, INDIE
Zákaznícka péče tel. č. -91 -44-66263900
Email: info@eucareindia.com
www.eucareindia.com
VYROBENO V INDII
Mfg. Lic. No. MFG/MD/2020/000084



Zplnomocnený zástupce v ES
Obelis s.a.
Bd. General Wahis, 53,
1030, Brusel. Belgie
Tel: +32(0)2 7325954,
Fax: +32(0)2 7326003
E-mail: mail@obelis.net



Jednorázové použitie



Neprovádět resterilizaci



Skladujte na suchém
místě při teplotě od 15 °C
do 30 °C



Nepoužívat, je-li obal
poškozen



Chraňte před přímým
slunečním zářením



Udržovat v suchu



Sterilizováno gama
zářením



Katalogové číslo



Číslo dávky



Datum výroby



Datum použitelnosti



Zdravotnícka pomôcka

SCROFALON®

CZ

Sterilní hemostatická vstřebatelná želatinová houba

POPIS VÝROBKU: Sterilní hemostatická vstřebatelná želatinová houba SCROFALON je hemostatický vstřebatelný zdravotnický prostředek vyrobený z vysoce čištěného neutrálního želatinového materiálu prasečího původu. Jedná se o bílý, světle bílý nebo téměř bílý, ve vodě nerozpustný, vysoce porézní, poddajný přípravek určený k aplikaci na krvácející plochy jako prostředek pro zástavu krvácení. K hemostáze dochází během 3 až 6 minut. SCROFALON se dodává jako sterilní výrobek a je určen výhradně k jednorázovému použití. **INDIKACE:** Prostředek je indikován ke kontrole krvácení během chirurgických zákroků. **KONTRAINDIKACE:** Nepoužívejte sterilní hemostatickou vstřebatelnou želatinovou hubku u pacientů se známou alergií na želatinu. **NÁVOD K POUŽITÍ:** Hubku nařežte na požadovanou velikost. Použijte pouze minimální množství potřebné k dosažení hemostázy. Hubku držte na místě krvácení pod mírným tlakem po dobu 10 až 15 sekund, dokud nedojde k hemostáze. Želatinová hubka může být ponechána v místě krvácení pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné. **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:** Uchovávejte mimo dosah dětí. SCROFALON® se používá jako pomocný prostředek a není určen jako náhrada pečlivé chirurgické techniky a správné aplikace ligatur nebo jiných konvenčních postupů pro hemostázu. Při otevírání obalů a vytahování hubky SCROFALON® používejte aseptické techniky pro zamezení kontaminace! Pokud je obal roztržený nebo proražený, prostředek SCROFALON® se nesmí použít. Ihned po dosažení hemostázy je třeba veškerý přebytečný SCROFALON® opatrně odstranit. **NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:** Nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky. **UCHOVÁVÁNÍ:** SCROFALON je zabalen do sterilního obalu a je sterilizován gama zářením. SCROFALON lze skladovat v suchu při teplotě 15 °C až 30 °C s dobou použitelnosti 5 let od data výroby. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte výrobek po uplynutí doby použitelnosti.



Vyrobena společností:

Eucare Pharmaceuticals (P) Ltd.,

Plot No. AC-25B, SIDCO Industrial Estate,

Thirumudivakkam, Chennai - 600 132, INDIE

Zákaznická péče tel. č. -91 -44-66263900

Email: info@eucareindia.com

www.eucareindia.com

VYROBENO V INDII

Mfg. Lic. No. MFG/MD/2020/000084



Zplnomocněný zástupce v ES

Obelis s.a.

Bd. General Wahis,53,

1030, Brusel, Belgie

Tel: +32(0)2 7325954,

Fax: +32(0)2 7326003

E-mail: mail@obelis.net



Jednorázové použití



Neprovádět resterilizaci



Skladujte na suchém místě při teplotě od 15 °C do 30 °C



Nepoužívat, je-li obal poškozen



Chraňte před přímým slunečním zářením



Udržovat v suchu



Sterilizováno gama zářením



Katalogové číslo



Číslo dávky



Datum výroby



Datum použitelnosti



Zdravotnická pomůcka

SFIF0-28122023